

OPC 3G Range Shade Chart (A Range)

シェード	コアステイン	オペーシヤス				ボディ	透明部	エナメル	比率	
		歯頸部	比率	中央部	比率					切端部
A1	CS-1	オペーシヤス A0	10	オペーシヤス A0		オペーシヤス A0		オパールインサイザル(クリア)	オパールインサイザル(ニュートラル)	10
		オペーシヤスモディファイヤ クロマA	1	モディファイヤ(ピンク)	5%	モディファイヤ(ピンク)	5%		インサイザル(ITIイエロー)	5
		モディファイヤ(ピンク)	5%							
A2	CS-3	オペーシヤス A0	10	オペーシヤス A0	10	オペーシヤス A0		オパールインサイザル(クリア)	オパールインサイザル(ニュートラル)	10
		オペーシヤスモディファイヤ クロマA	2	オペーシヤスモディファイヤ クロマA	1	モディファイヤ(ピンク)	5%		インサイザル(ITIイエロー)	10
		モディファイヤ(ピンク)	5%	モディファイヤ(ピンク)	5%					
A3	CS-6	オペーシヤス A0	10	オペーシヤス A0	10	オペーシヤス A0	10	オパールインサイザル(クリア)	オパールインサイザル(ニュートラル)	10
		オペーシヤスモディファイヤ クロマA	3	オペーシヤスモディファイヤ クロマA	2	オペーシヤスモディファイヤ クロマA	1		インサイザル(ITIオレンジ)	10
		モディファイヤ(ピンク)	5%	モディファイヤ(ピンク)	5%	モディファイヤ(ピンク)	5%			
A3.5	CS-6	オペーシヤス A0	10	オペーシヤス A0	10	オペーシヤス A0	10	オパールインサイザル(クリア)	オパールインサイザル(ニュートラル)	10
		オペーシヤスモディファイヤ クロマA	3.5	オペーシヤスモディファイヤ クロマA	2.5	オペーシヤスモディファイヤ クロマA	1.5		インサイザル(ITIオレンジ)	10
		モディファイヤ(ピンク)	5%	モディファイヤ(ピンク)	5%	モディファイヤ(ピンク)	5%		オパールインサイザル(グレイ)	5
A4	CS-6	オペーシヤス A0	10	オペーシヤス A0	10	オペーシヤス A0	10	オパールインサイザル(クリア)	オパールインサイザル(ニュートラル)	10
		オペーシヤスモディファイヤ クロマA	4	オペーシヤスモディファイヤ クロマA	3	オペーシヤスモディファイヤ クロマA	2		インサイザル(ITIオレンジ)	10
		モディファイヤ(ピンク)	5%	モディファイヤ(ピンク)	5%	モディファイヤ(ピンク)	5%		オパールインサイザル(グレイ)	10

※本チャートはOPC 3G ベーシックセレクションを用いた場合の基本的築盛配合を示しています。メーカーによるシェードコーディネーションチャート(マニュアル)とは異なりますことご了承ください。

Design: RADICAL SPACE Toshiaki Kawabata

Rev. 07.12.03.